

新規検査項目及び検査内容変更のお知らせ

謹啓、時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目につきまして、現行測定試薬製造中止に伴い、検査内容の一部変更および新材料での新規受託を開始することとなりましたのでご案内申し上げます。

先生方にはご不便をお掛け致しますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。 敬白

***** 記 *****

■検査内容変更項目

項目No.	検査項目名	変更箇所	新	旧
16226	クラミジアアトラコマチス PCR (ぬぐい液)	検体材料	ぬぐい液	ぬぐい液
18420	淋菌同定-PCR (ぬぐい液)	保存方法	冷蔵(常温も可)	冷蔵
18435	淋菌・クラミジア同時同定 PCR(ぬぐい液)	容器	専用容器 A78	専用容器 A56
		検査方法	リアルタイムPCR	PCR
16227	クラミジアアトラコマチス PCR (尿)	検体材料	初尿	初尿
18421	淋菌同定-PCR (尿)	保存方法	冷蔵(常温も可)	冷蔵
18436	淋菌・クラミジア同時同定 PCR(尿)	容器	専用容器 A79	滅菌スピッツ容器S27
		検査方法	リアルタイムPCR	PCR

■新旧二法の相関

●クラミジアアトラコマチス
アンプリコア (旧法)

コ/バス4800 CT/NG (新法)	n= 474	陽性	陰性	合計
	陽性	22	3	25
	陰性	0	449	449
	合計	22	452	474

一致率 99.4%

●淋菌
アンプリコア (旧法)

コ/バス4800 CT/NG (新法)	n= 474	陽性	陰性	合計
	陽性	7	2	9
	陰性	1	464	465
	合計	8	466	474

一致率 99.4%

Detection of *Chlamydia trachomatis* and *Neisseria gonorrhoeae* in genitourinary Tract Specimens: MISC 2011

■変更実施日

平成24年12月3日(月) 受付分より

以上

●クラミジア・トラコマチス核酸同定(PCR)、淋菌核酸同定(PCR)につきまして、新法(リアルタイム PCR)では、咽頭検体(うがい液)での検査が可能となりましたので、下記検査要綱にて受託を開始させていただきます。

■ 新規登録項目

検査項目名	クラミジア・トラコマチス PCR (うがい液)	淋菌同定-PCR (うがい液)	淋菌・クラミジア同時同定 PCR (うがい液)
項目No.	16229	18422	18439
検体材料	うがい液		
容器	専用容器 A79		
保存方法	冷蔵(常温も可)		
検査方法	リアルタイム PCR		
基準範囲	(一)		
所要日数	3~4日		
保険点数	210点	210点	300点
判断料	微生物学的検査 150点		

●うがい液検体採取法

うがいの仕方

- ① 0.9%生理食塩水(日局方)など15~20mLを口に含み、顔を上に向けて15~20秒間、勢よく“ガラガラ”とうがいを行います。

検体輸送液への懸濁

- ② うがい液全量を50mLのうがい容器等に回収し、スポイトで専用検体採取セットに必要量添加します。

検体容器の保管

- ③ 確実に蓋を閉め、ラベルに必要事項を記入します。

■新旧二法の相関

●クラミジア・トラコマチス DNA の検出

CT DNA (n = 445)		SDA法 (咽頭スミア)	
		陽性	陰性
本キット (咽頭うがい液)	陽性	23	6
	陰性	2	414
一致率		98.2% (437/445)	

●淋菌 DNA の検出

NG DNA (n = 445)		SDA法 (咽頭スミア)	
		陽性	陰性
本キット (咽頭うがい液)	陽性	41	10
	陰性	12	382
一致率		95.1% (423/445)	

熊本悦明ら：医学と薬学, 66 (6): 1007-1014, 2011

■開始期日

平成24年12月3日(月) 受付分より

《新法の専用容器》 ご依頼の際は必ず専用容器にてご提出ください。

[ぬぐい液用 A78]



[尿・うがい液用 A79]



この間に収まる様に検体を添加してください。