

令和 4 年 3 月

## 検査容器（T11）変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

さて、下記検査項目の検体採取容器（容器番号：T11）を変更させていただきますので、ご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。 敬白

\*\*\*\*\* 記 \*\*\*\*\*

### ■対象項目／変更内容

- O1460 アンモニア(NH3)

	新	旧
容器番号	T11	
採取容器		
容器の保存	室温	冷蔵
有効期限	外袋に明記（製造後約 1 年） 外袋開封後は 1 ヶ月	容器に明記

### ■採血手順について

容器は真空採血管ですが、除蛋白液が 4.0mL 充填されており、直接採血による除蛋白液の逆流を防止するため真空採血は厳禁です。

- ① シリンジで採血を行う。
- ② 容器の蓋を開け、注射針を外して血液を 1.0mL 正確に入れ、蓋をしっかり閉める。
- ③ 直ちに転倒混和後、遠心分離する。
- ④ 上澄液 3.0mL を提出用容器（S3）に移して凍結保存する。

### ■開始期日

在庫状況に応じて順次切り替えさせていただきます。  
（旧容器も有効期限内は使用可能です。）

以上

22-0357